



■ 標準配置図 リクシー LIX-120M

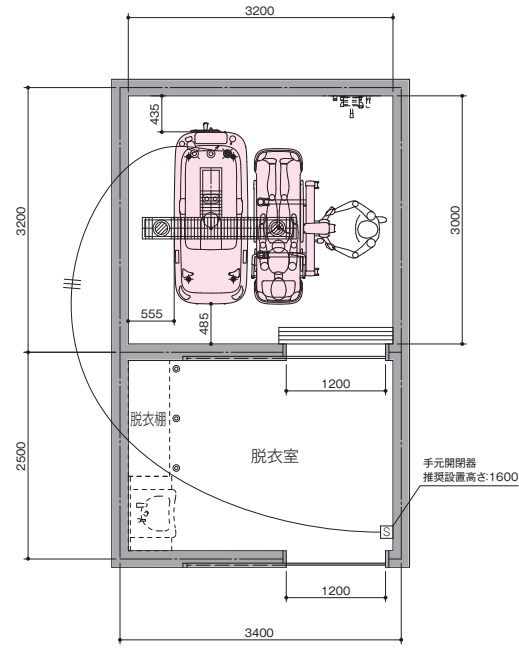


設備	仕様	工事区分
給湯水	給湯温度 : 60~65℃ (立ち上がり位置での温度) 給湯水圧力 : 120~150kPa (1.2~1.5kgf/cm ²) (圧力変動を極力避けてください)	設備工事
	湯水圧力比 : 2:1~1:2以内 流量 : 22L以上/min (湯水共) 給湯器 : (号数)50号 【※単独が必要です】 <設備> 立ち上げ : 各20A 床面ボールバルブ止め 立ち上げ高さ : FL+120以内に収めてください 各々、浴室または浴室近辺に元バルブを設置ください。	
排水	排水ピット : 深さ200mm 満幅200mm 排水目皿 : 80A+ラップ付×2ヶ所 浴槽容量 : 436L 必要排水能力 : 0~60秒 126L	建築工事 設備工事
	電源 : 単相100V 50/60Hz 所要電源容量 : 380VA/380VA <設備> 立ち上げ : PF管呼び16 床面立ち上げ 長さ:2000mm 電線 : 1.6mm ² または2.0mm ² × 3芯 PF管端より300出してください アース : D種接地工事 手元開閉器 : 単相100V15A防雨型 (浴室外に設置ください) 漏電遮断器 : 単相100V15A (浴室外の配電盤に設置ください) 高感度高速型 感度電流30mA 動作時間0.1秒以内 ※電源は単独の専用回路にしてください。 浴室外にストレッチャー充電用コンセントを設けてください。	
電気工事	注1) 搬入路は有効開口1200mm以上、有効通路幅1700mm以上必要です。 注2) ストレッチャー専用充電器は湿気不可です。事故防止のためにも充電は浴室外で行ってください。 注3) ストレッチャー専用充電器は壁面にネジで固定することができます。ただし、バッテリーと充電器の合計質量は約3.5kgありますので、取り付け部はこれに耐えられる壁面強度が必要となります。	

■ 浴槽 (単位:mm)

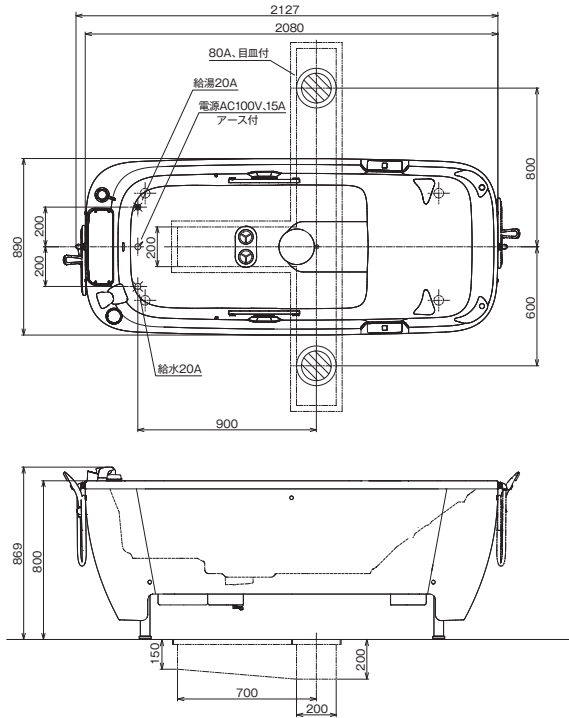

■ 片持型ストレッチャー (単位:mm)

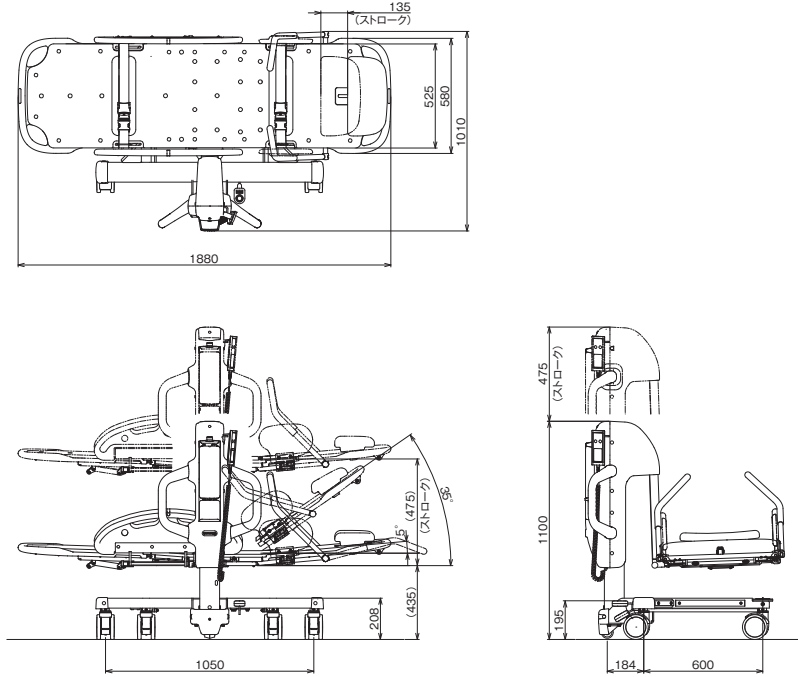

※上記仕様及び外觀は、改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

Lixy

Lift & Bath

リクシースタンダード LIX-130 LIX-120M LIX-120 LIX-110 LIX-100M LIX-100
リクシーシンプル LIS-110M LIS-110 LIS-100M LIS-100



酒井医療株式会社

東京都新宿区山吹町358-6 〒162-0801
www.sakaimed.co.jp

- | | |
|---------------------------|-------------------|
| 札幌営業所 (北海道) | Tel: 011-780-5570 |
| 盛岡営業所 (青森・秋田・岩手) | Tel: 019-656-5336 |
| 仙台営業所 (宮城・山形・福島) | Tel: 022-390-6840 |
| 新潟営業所 (新潟) | Tel: 025-278-4777 |
| 長野営業所 (山梨・長野) | Tel: 0263-40-5014 |
| 埼玉営業所 (埼玉・群馬・栃木) | Tel: 048-662-4560 |
| 千葉営業所 (千葉・茨城) | Tel: 047-497-3691 |
| 東京営業所 (東京) | Tel: 03-5227-5779 |
| 東京営業所 (フィジオ) | Tel: 03-5227-5776 |
| 横浜営業所 (神奈川・静岡) | Tel: 045-590-5485 |
| 名古屋営業所 (愛知・岐阜・三重) | Tel: 052-263-9867 |
| 金沢営業所 (石川・富山・福井) | Tel: 076-292-1161 |
| 関西営業所 (大阪・京都・滋賀・奈良・和歌山) | Tel: 06-6386-3545 |
| 神戸営業所 (兵庫) | Tel: 078-579-6236 |
| 広島営業所 (広島・岡山・山口・鳥取・島根) | Tel: 082-830-0420 |
| 高松営業所 (香川・徳島・愛媛・高知) | Tel: 087-865-0715 |
| 福岡営業所 (福岡・長崎・大分・佐賀・熊本・沖縄) | Tel: 092-588-9331 |
| 鹿児島営業所 (鹿児島・宮崎) | Tel: 099-219-7250 |

取扱店

Lixy

Lift & Bath

上質で豊かな時間
コンパクト浴槽のその先へ

限られたスペースの中で、入浴の喜びを
一層味わってほしい。

リクシーは、そんな想いから誕生しました。
ケアする方の使い勝手や入浴介助の時間
短縮にも目を向け、上質で豊かな時間を
生み出すお手伝いをします。



ゆとりある入浴を安全・快適に実現

広々とした浴槽内でゆったり入浴

浴槽自体はコンパクトでも浴槽内は広々。浴槽内は1915×830mmあり、大柄な方でもゆったり入浴できます。



担架幅は最大58cmのワイド設計

より近くで安全に

ストレッチャーの脚部が浴槽下部に潜り込むので、介助する方は、入浴する方の真横まで近づくことが可能です。また、浴槽の縁高は80cm。腰をかがめずに楽な姿勢で介助できます。



マイクロバブルでしっかりきれい 入浴後も温かさが持続


※リクシー マイクロバブル仕様
LIX-120M・LIX-100M・LIS-110M・LIS-100Mのみ対応
※マイクロバブル機能は株式会社サイエンスの製品を使用しています。



優しい洗浄力

お肌のすみずみまで届くマイクロバブル*が、入浴するだけでシワや毛穴の奥の老廃物をやさしく浮かせ上げるほか、気になるニオイの元も洗い流します。

※マイクロバブルは直径100 μ m未満で1 μ m(=0.001mm)以上の泡の事(ISOで定められた国際標準規格)です。通常、水の中で出来る泡と比較しても、マイクロバブルは極めて小さく、負電位のため微小なゴミを吸着して水面に浮上させる性質を持っています。

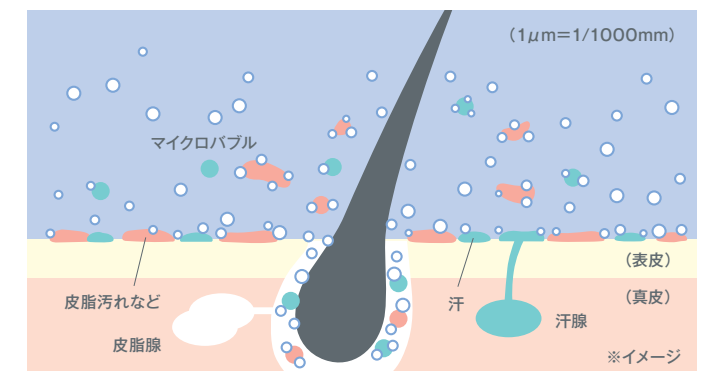


身体の芯まで温める

通常のお湯とリクシー マイクロバブルで入浴した後の体表温度を測定。水と空気できた超微細な気泡、マイクロバブルが肌のすみずみまで包み込み、身体の芯まで温めます。入浴後もぽかぽかが持続し、湯冷えにくいのが特長です。


〈通常のお湯とマイクロバブルのお湯の体表面温度比較〉

※室温21℃で、マイクロバブルを発生させたお湯(40℃)に5分間入浴した後、10分後に赤外線サーモグラフィで体表面温度を撮影。

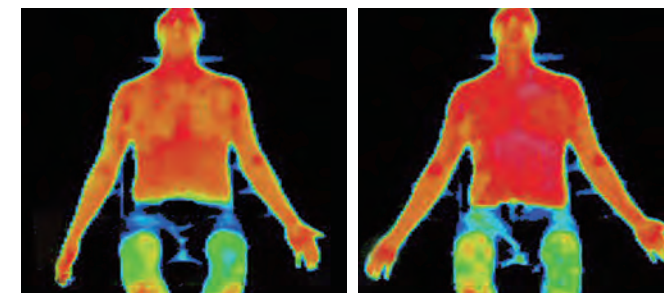

通常のお湯

マイクロバブルのお湯

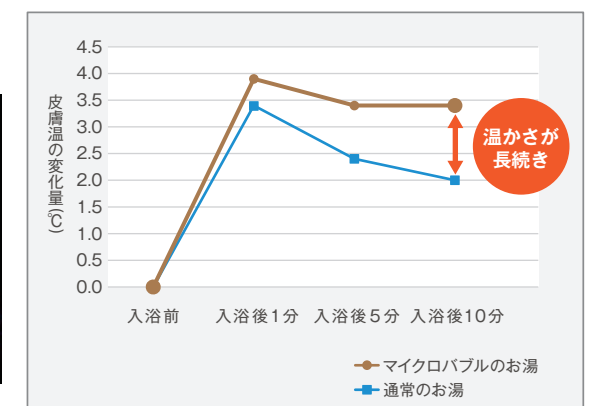

使いやすさにこだわった操作性



持ちやすい 移動用グリップ

移動用のグリップは、しっかりとつかめる形状となっています。担架側のグリップをつかんで移動することも可能です。



充電が簡単な 着脱式バッテリー

バッテリーはストレッチャー上部に設置。腰をかがめずにバッテリーの着脱や残量の確認ができます。



残量目盛り

※LIX-130・LIX-120M・LIX-120・LIX-110・LIX-100M・LIX-100のみ対応

初めて使う方でも わかりやすい表示パネル

操作内容や湯温・入浴時間がひとめでわかる大型の表示パネル。イラスト付きの操作スイッチに加え、音声やメロディによるナビゲート機能も搭載。初めて操作する方でも直感的に使いこなすことができます。



- 湯はりスイッチ 適正水位まで自動給湯
- 湯温設定 スイッチで簡単設定
- 音声サポート 操作を音声でサポート
- 英語表記 各スイッチに英語表記

細やかな部分も 介助しやすい設計

4輪トータルロック機構
全てのキャスターをひと踏みで同時にロック。個別にロックする手間が省けます。



双輪キャスター
大きめの双輪キャスターは、旋回や方向転換もスムーズ。小回りもきき、狭い場所での移動もストレスフリーです。



シンプルな操作のリモコン

リモコン操作は上昇・下降の2つのボタンだけのシンプル設計。また、ストレッチャーの上昇・下降はリモコンと本体操作部のどちらでも行えます。




心地よい入浴時間をサポートする安全設計



高温時下降停止機能

ストレッチャー側で高温を検知した際は、担架の下降が停止し、高温ランプが点滅して危険を知らせます。

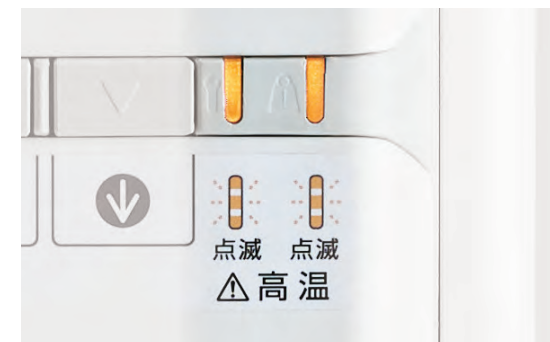

左右独立式で安心安全な手すり

左右独立式のため、側臥位での洗身時などは片側をはね上げて使用することも可能です。



※上肢用サイドフェンスはオプションです。

転落を防ぐサイドフェンス

大型サイドフェンスに加え、上肢用サイドフェンスをオプションで取り付けることができます。身体が担架からはみ出るのを防ぐので、安心して介助が行えます。



※LIX-130・LIX-120M・LIX-120・LIX-110・LIX-100M・LIX-100のみ対応

温度管理システム

火傷を未然に防ぐため、給湯温度が46℃以上になると給湯は自動停止。同時に、表示部も点滅してアラートを出します。

挟み込み時下降停止機能

万が一の挟み込み発生時には、ストレッチャーの下降が自動で停止します。

入浴時の姿勢保持も

入浴中は前ずれを防いで、安定した入浴姿勢が保てる設計になっています。



別売 バスクッションポジションナー

濡れても重くならず、手軽に入浴中の姿勢保持にお使いいただけます。




お手入れ、スペースにも
生まれるゆとり



入浴前後のお掃除も簡単

お掃除しやすい シンプル構造

凹凸の少ない浴槽内は、毎日のお掃除も簡単です。
また、浴槽下部にスペースを設け、床のお掃除もしやすくなっています。

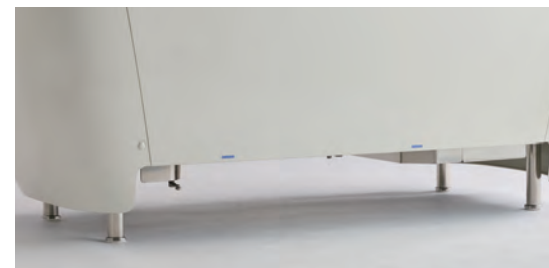

※LIX-130・LIX-120・LIX-120Mのみ対応

2つの塩素殺菌システム

清掃時に機器を殺菌する「殺菌(清掃時)」と入浴中にお湯を殺菌する「殺菌(入浴中)」を搭載。
担架を浴槽内に入れ「殺菌(清掃時)」を行えば、ワンタッチで浴槽と担架のお手入れが同時に行えます。

3m×3m のスペースでも 設置可能


浴槽を壁に近づけて設置することも配慮した設計で、3m×3mの小さな浴室にも設置可能です。

お掃除のしやすさに配慮した 担架カバーと担架マット

担架カバーと担架マットは簡単に取り外しができます。
裏側やフレームの汚れもお掃除しやすく衛生的です。



カバー止め

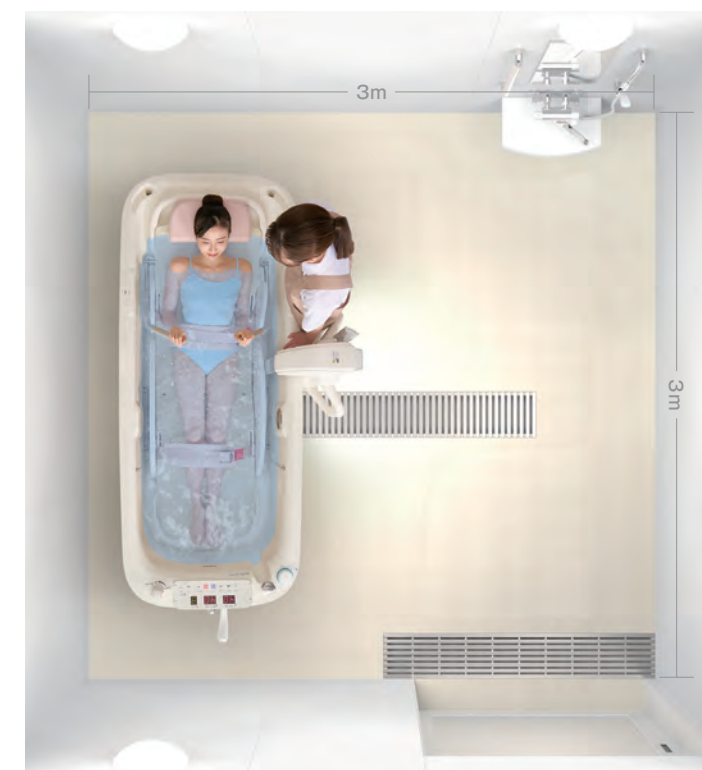



スタンダードタイプ 浴槽

湯温がワンタッチで設定できる電子制御ミキシングや入浴時間計、音声サポートを標準装備したスタンダードタイプ。

- LIX-130
- LIX-120M
- LIX-120
- LIX-110
- LIX-100M
- LIX-100



シンプルタイプ 浴槽

レバー式ミキシングを標準装備した浴槽と浴槽のみのシンプルタイプ。

- LIS-110M
- LIS-110
- LIS-100M
- LIS-100

[機能対応表]

		塩素殺菌装置	マイクロバブル	気泡浴装置	湯温調節 電子制御ミキシング	湯温調節 レバー式ミキシング	表示パネル機能 音声サポート・入浴時間計・ デジタル温度表示・湯温管理システム	ハンドシャワー
スタン ダード	LIX-130	●	—	●	●	—	●	標準1基 + オプション1基
	LIX-120M	●	●	—	●	—	●※	標準1基 + オプション1基
	LIX-120	●	—	—	●	—	●	標準1基 + オプション1基
	LIX-110	—	—	●	●	—	●	標準1基 + オプション1基
	LIX-100M	—	●	—	●	—	●※	標準1基 + オプション1基
	LIX-100	—	—	—	●	—	●	標準1基 + オプション1基
シン プル	LIS-110M	—	●	—	—	●	—	標準1基 + オプション1基
	LIS-110	—	—	—	—	●	—	標準1基 + オプション1基
	LIS-100M	—	●	—	—	—	—	—
	LIS-100	—	—	—	—	—	—	—

※マイクロバブルの操作は音声サポートに対応していません

浴槽 仕様

型式	LIX-130	LIX-120M	LIX-120	LIX-110	LIX-100M	LIX-100	LIS-110M	LIS-110	LIS-100M	LIS-100	
外形寸法 L×W×H	2127×890×869mm										
浴槽内寸法 L×W×D	1915×830×500mm										
質量	約160kg					約140kg					
浴槽容量	436ℓ										
実使用湯量	330ℓ										
電源	単相100V (50Hz/60Hz)								—	単相100V (50Hz/60Hz)	—
電力 (50Hz/60Hz)	100W/110W	330W/330W	50W/50W	90W/100W	330W/330W	40W/40W	290W/290W	—	290W/290W	—	
電源入力 (50Hz/60Hz)	130VA/155VA	330VA/330VA	70VA/85VA	120VA/140VA	330VA/330VA	60VA/70VA	290VA/290VA	—	290VA/290VA	—	
材質	FRP										
	スチール・粉体塗装										
付属品	ハンドシャワー(1本)、浴槽クリーナー-A、泡スプレー								浴槽クリーナー-A、泡スプレー		



片持型ストレッチャー LWT-100

片持型ストレッチャー 仕様

外形寸法 L×W×H	1880×1010×1100~1575mm	
担架面高さ	435~910mm	
質量	120kg	
最大使用者体重	115kg	
電源	バッテリーDC24V	
材質	フレーム	ステンレス・一部粉体塗装
	駆動部カバー	プラスチック
	担架カバー	プラスチック
	マット	プラスチック(EVAスポンジ)
機能	背当てリクライニング、4輪タータルロック、高温時停止機能、脚部ギャッジ機能	
付属品	マット、安全ベルト、バッテリー(1個)、充電器	



OPTION

ハンドシャワー LIX-40



OPTION

上肢用サイドフェンス LWT-20